

内視鏡シールド

胆膵 Ver. 上部消化管 Ver.

胆膵 Ver.

特徴

1. 被検者の咳、嘔吐反射による直接飛沫を防ぐ
2. マットレスの下に挟み込むように固定するため、放射線防護カーテンと干渉しない
3. 穴をふさぐビニールは着脱が容易で大きさに余裕があるため内視鏡操作を妨げない
4. 一枚の板のため、患者間の清掃が簡便
5. 下にスリットが開いているため、緊急時にスコープを抜去することなくシールドの取り外しが可能

詳しい製品内容は裏面をご覧ください

上部消化管 Ver.

特徴

1. 被検者の咳、嘔吐反射による直接飛沫、エアロゾルの飛散を最小限に防ぐ
2. 被験者の呼吸、視野を妨げない
3. 介助者が被験者の体勢を補助することが可能(緊急時の対応も可能)
4. 穴あきフードは着脱が容易で大きさに余裕があるため内視鏡操作を妨げない
5. 上部消化管出血に対する緊急内視鏡の際に、嘔吐物の飛散を防ぐことも可能
6. COVID-19陽性患者・疑い患者には、頭側と足側をビニールで覆い、背面の穴にフードを装着し、HEPAフィルター付陰圧空気清浄機をパイプで繋ぐ事により、陰圧に近い状況を作ることにより安全に検査をすることが可能

詳しい製品内容は裏面をご覧ください



取扱い上の注意

- ・ アクリル板はアルコール消毒をすると、クラック(ひび割れ)が発生する場合があります
消毒には、中性洗剤を薄めたものや次亜塩素酸水、界面活性剤洗剤または家庭用塩素系漂白剤(ハイター等)の希釈液で行うことをお勧めします
- ・ アクリル板組立て商品の為、運搬時等は破損等にお気をつけ下さい
- ・ 角部分での切傷などにご注意下さい

